


1. Trykk på  i Windows , og logg inn.

Pasient-ID
123456 12345

2. Tast inn personnummer.

3. Pasienten vises i søkeområdet. Trykk på + for å se alle undersøkelsene

	+	Pasient-ID	Pasientnavn
	19	181145*49709	*TESTESEN, TEST MHH


4. **Merk** undersøkelsene du vil se.
5. **Høyreklikk** og velg **Åpne bilder**.
6. Pasientens navn, personnummer og antall undersøkelser som er hentet vises.

*TESTESEN, TEST MHH 181145*49709
26.08.2013 08:15:59 MHH689905

  1 av 5 


7. For å veksle mellom undersøkelsene, trykker du frem og tilbake på

8. For å finne flere undersøkelser, trykk på

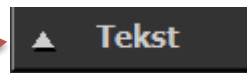


9. Dobbelklikk på undersøkelsen du vil hente, og du går automatisk tilbake til bildene.

Om det ikke skjer, trykk på

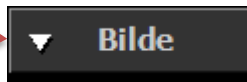



10. Er det mange bilder i undersøkelsen, kan du trykke og holde inne venstre museknapp, og dra bildet dit du vil ha det.

11. Skal du dele skjermen i to for å vise både RTG og MR f.eks., trykk på  og velg den med sort strek vertikalt.

12. For å beholde en undersøkelse på den ene siden, trykk på



13. Trykk deretter på undersøkelsen du vil ha der fast. Da dukker  opp øverst i midten på bildet.

14. For å gå tilbake, velg  og trykk på den med hvit strek vertikalt.



15. Om kontrasten er dårlig i bildet, trykk på

16. Den vil da «henge» på musa.

17. Trykk på bildet du vil korrigere en gang. Når du da flytter musa, vil kontrasten forandre seg. Trykk på bildet en gang til for å koble ut verktøyet.

18. Om det blir veldig rart, trykk på  for å tilbakestille.

19. Når du er ferdig med pasienten, trykk på for å nullstille pasientlisten i bildeområdet.

*TESTESEN, TEST MHH 